

POLSKA

AMBER CLASSIC / AMBER CLASSIC X

Osobisty System Bezpieczeństwa i Pomocy Medycznej



Visonic[®]
By żyło się bezpiecznie

Instrukcja użytkownika




Amber
Classic

Bezprzewodowy system bezpieczeństwa i pomocy medycznej

Visonic Sp. z o.o. ul. Smoleńskiego 2, 01-698 Warszawa, tel.:(22) 639 34 36, Fax.:(22) 833 48 60,
www.visonic.com.pl

AMBER CLASSIC

Bezprzewodowy system bezpieczeństwa i pomocy medycznej

Dziękujemy za zakup urządzenia AMBER CLASSIC / AMBER CLASSIC X.

Jedyną cechą różniącą AMBER CLASSIC X od AMBER CLASSIC jest brak wyświetlacza w wersji CLASSIC X.

System ten został zaprojektowany, by polepszyć standard życia wszystkich osób potrzebujących opieki. W razie nagłej sytuacji, wypadku pozwala na szybkie wezwanie pomocy poprzez naciśnięcie przycisku przenośnego nadajnika lub jednostki centralnej. W przypadku takich zagrożeń jak: pożar, zalanie, wyciek gazu, zwiększone stężenie tlenu węgla (czadu), system automatycznie powiadomi CallCenter bądź osoby prywatne. Aparat posiada duży wyświetlacz (wersja AMBER CLASSIC), który wyświetla status systemu, godzinę oraz inne komunikaty np. przypomnienia o zażyciu lekarstw.

Urządzenie posiada wydajne zasilanie awaryjne. Kiedy zasilanie AC zostanie przywrócone bateria jest automatycznie ładowana.

Zawartość zestawu


Zanim zaczniesz konfigurować system, upewnij się, że masz wszystkie elementy.

- Jednostkę centralną AMBER CLASSIC / AMBER CLASSIC X
- Zasilacz 220VAC / 12VAC.
- Nadajnik w formie zegarka - MCT-212.

Dodatkowe urządzenia, które współpracują z systemem:

- Nadajnik w formie zegarka (MCT-211 / MCT-212)
- Autonomiczny wskaźnik dymu zasilany baterią (MCT-425)
- Przenośny czujnik upadku z uchwytem (MCT-241MD)
- Odporny na zwierzęta do 38 kg, bezprzewodowy czujnik PIR (NEXT K9-85 MCW)
- Kontaktron (MCT-302N)
- Podwajacz zasięgu (MCX-600)

Jednostkę centralną przedstawiono na Rys. 1.

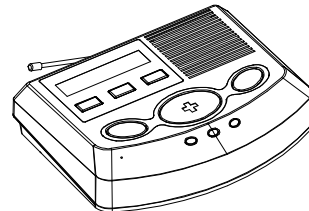


AMBER CLASSIC /
AMBER CLASSIC X



MCT-211



MCT-212

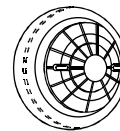


MCT-425




MCT-241MD




NEXT K9-85

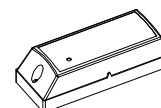


MCT-302N

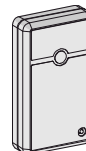

MCX-600

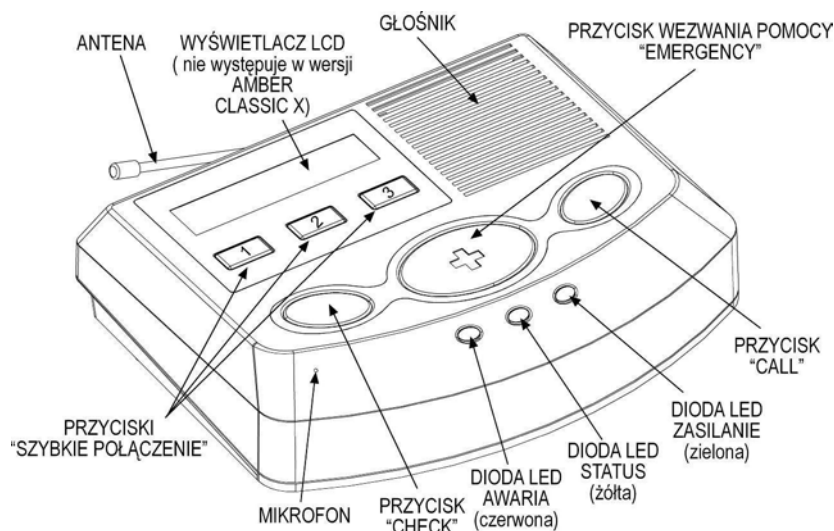

Rys 1 – Widok zewnętrzny

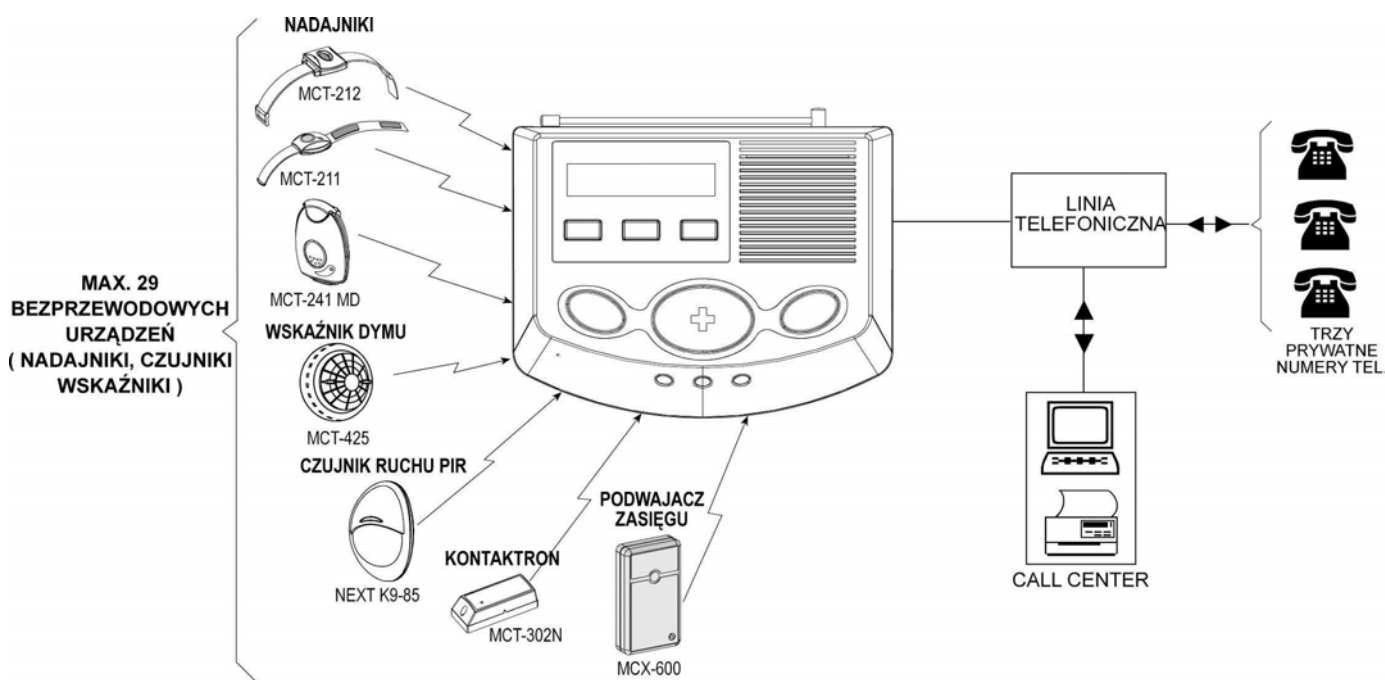

Rys. 2 – Konfiguracja systemu

SPECYFIKACJE

Informacje ogólne

Czas działania baterii nadajnika: 3 lata (przy typowym użytkowaniu)

Częstotliwość: 433 i 868 MHz

Wyświetlacz (wersja AMBER CLASSIC): 16 znaków w dwóch liniach, podświetlenie LED.

Zasilanie: 12 VAC, 1 A

Bateria: NI-MH 9.6 V, 1.8 Ah, typu GP 0-9912-G.

Zgodność ze standardami: część 15 i 68 norm FCC.

LED:

ZASILANIE (zielona): zazwyczaj włączona, wskazując tym samym, że urządzenie jest odpowiednio zasilane.

AWARIA (czerwona): zazwyczaj wyłączona. Jeśli dioda ta świeci to wystąpił problem z systemem lub jednym z urządzeń z nim współpracujących (którego nazwa pojawia się na wyświetlaczu AMBER CLASSIC).

STATUS (żółta): zazwyczaj wyłączona, co wskazuje na to, że system pracuje w trybie załączenia częściowego. Świeci, gdy urządzenie jest w trybie załączenia całkowitego.

Funkcje specjalne:

- wzywanie pomocy za pomocą przenośnego nadajnika
- komunikacja z CallCenter za pomocą systemu głośnomówiącego
- system obsługuje do 29 użytkowników (przenośne nadajniki i wskaźniki dymu)
- dwukierunkowa komunikacja głosowa
- opcja uaktualniania ustawień systemu poprzez oprogramowanie komputerowe
- zdalne sterowanie przez telefon

- zdalna diagnostyka i dostęp do listy zdarzeń
- powiadomienia głosowe i wizualne

Dane fizyczne

Temperatura pracy: 0°C do 49°C

Temp. przechowywania: od -20°C do -60°C

Size: 248 x 185 x 55 mm.

Waga (bez baterii): 1.35 kg

Kolor: biały

Uwaga: Odbiornik stacji monitorującej to SURGARD MLR2.

KONFIGURACJA SYSTEMU

By skonfigurować system postępuj według poniższych kroków. Po ukończeniu kroków 1-5 system automatycznie połączy Cię z CallCenter, które udzieli Ci wskazówek dotyczących dalszych ustawień.

Krok 1

Wybierz miejsce dla urządzenia

Jeśli to możliwe umieść jednostkę centralną w miejscu domu, w którym spędzasz najwięcej czasu. Właściwa lokalizacja powinna również umożliwiać odbiór sygnałów z przenośnych nadajników i wskaźników dymu.

Aparat może być zainstalowany na blacie lub też zamontowany na ścianie.

Uwaga: Niektóre miejsca w Twoim domu mogą znajdować się poza radiowym zasięgiem urządzenia, co może powodować, że system nie będzie otrzymywał sygnałów z nadajników. W takiej sytuacji możesz użyć rozszerzenia MCX-600, by zwiększyć zasięg radiowy jednostki centralnej.

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Visonic, by uzyskać więcej informacji.

Krok 2

Ustaw antenę urządzenia (Rys. 3)


Ustaw antenę w pionowej pozycji. Dzięki niej urządzenie może komunikować się z przenośnymi nadajnikami i wskaźnikami.

Krok 3

Podłącz aparat do linii telefonicznej (Rys. 4)*

System komunikuje się z Call Center poprzez analogową linię telefoniczną.

1. Podłącz jednostkę centralną do gniazda linii

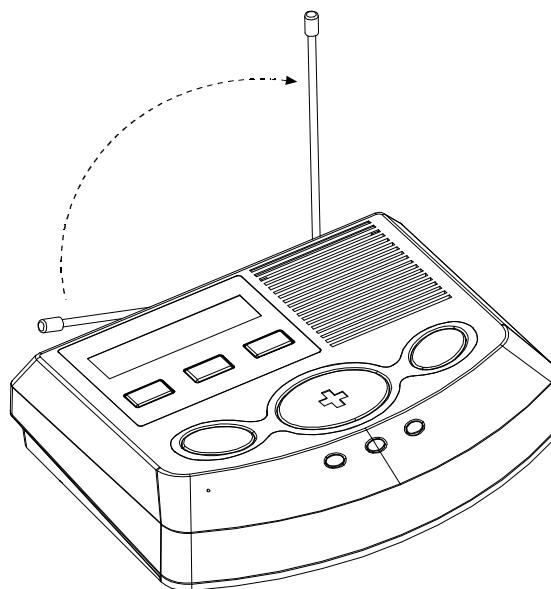


Rys. 3 – Aparat z ustawioną anteną

telefonicznej. Jeśli jest tam już podłączony aparat telefoniczny to wyjmij wtyczkę aparatu i podłącz ją do wejścia telefonicznego z tyłu jednostki centralnej „PHONE” (Rys. 4). Telefon będzie działał jak dotychczas.

2. Kabel linii telefonicznej jest już podłączony do gniazda aparatu (gniazdo „WALL JACK”). Podłącz drugi koniec kabla linii telefonicznej do gniazda na ścianie. Aparat korzysta już z linii telefonicznej.

Uwaga: Istnieje również cyfrowa linia telefoniczna DSL. Jeśli jest ona aktywna musisz zainstalować specjalny filtr. Rys.4 ilustruje właściwą instalację.

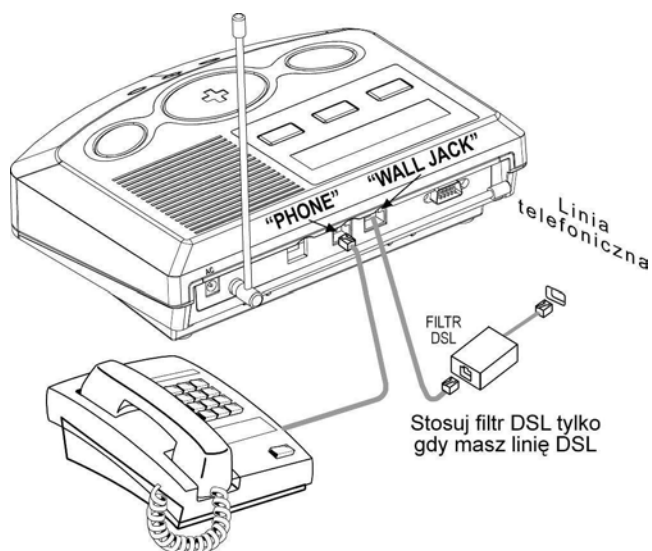

Rys. 4 – Podłączanie do linii telefonicznej

Krok 4

Podłączanie zasilania (Rys. 5a/b)


W trakcie typowego funkcjonowania urządzenie wykorzystuje zasilanie 12V AC dostarczane z wykorzystaniem dedykowanego zasilacza oraz zasilanie awaryjne 9,6V DC. Kabel od zasilania AC może być owijany wokół ramki montażowej, by zapobiec nieumyślnemu rozłączeniu go.

1. Okręć kabel zasilania wokół ramki (Rys. 5a).
2. Włóż wtyczkę zasilania do wejścia „AC” jednostki centralnej (Rys.5b).
3. Podłącz drugi koniec kabla zasilania do gniazda elektrycznego 230V AC.

Przed pierwszą instalacją systemu AMBER wszystkie trzy diody LED świecą (wersja AMBER CLASSIC X). Powiadomienia głosowe informują o problemie z AC, linią telefoniczną lub baterią, w razie gdy zaistnieje taki problem.

Uwaga: Kiedy usuniemy wtyczkę i urządzenie jest odłączone od zasilania, będzie ono działało do 24 godzin dzięki baterii, dopóki nie zostanie ponownie podłączone zasilanie.

Kiedy zasilanie jest dostarczane do AMBER CLASSIC X, na przednim panelu świeci się zielona dioda LED.

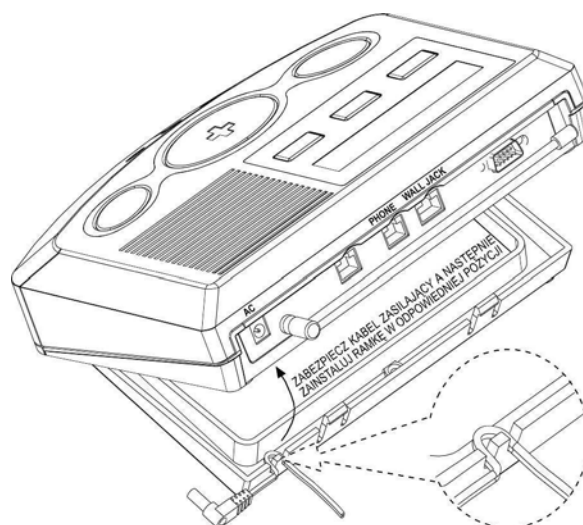


Rys. 5a – Zabezpieczanie kabla

Krok 5

Aparat łączy Cię teraz ze Call Center:

Po podłączeniu do systemu zasilania i linii telefonicznej, przedstawiciel z Call Center rozpocznie z Tobą rozmowę. Będziesz mógł ją słyszeć i z nią rozmawiać poprzez jednostkę centralną. W takiej sytuacji nie ma potrzeby używania telefonu. Przedstawiciel powie Ci co jeszcze masz zrobić i poprowadzi Cię w dalszych ustawieniach

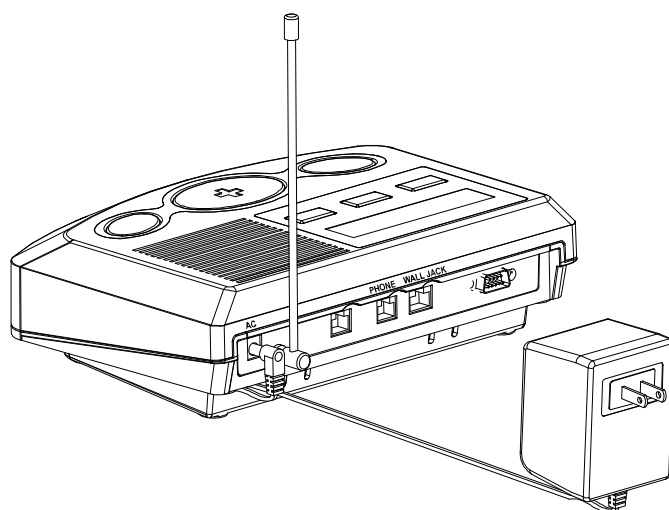

Rys. 5b – Podłączanie zasilania do aparatu

MONTAŻ JEDNOSTKI CENTRALNEJ

Aparat może być umieszczony na blacie (Rys 6) lub na ścianie (Rys. 7). W obydwu przypadkach musi on znajdować się blisko gniazda elektrycznego i linii telefonicznej.


Montaż aparatu na blacie

1. Połącz zaczepy z otworami jak to pokazano na Rys 6.
2. Umieść aparat z zamocowaną ramką na blacie.


OPCJA: Montaż aparatu na ścianie

1. Ramkę montażową obróć o 180°, jak to pokazano na Rys. 7a (dwa otwory montażowe na górze, jeden na dole ramki).
2. Oznacz miejsca wierceń wykorzystując ramkę montażową.
3. W oznaczonych miejscach wywierć 3 otwory, włóż w nie wkręty i je zamocuj (Rys. 7b).
4. Podłącz baterie zasilania awaryjnego jednostki centralnej. Zamknij komorę baterii.
5. Zamocuj ramkę do ściany, a następnie powieś jednostkę centralną na ramce wykorzystując odpowiednie zaczepy (Rys. 7c).

Uwaga: Użyj śrubokręta o średnicy 3.5 x 25 mm .

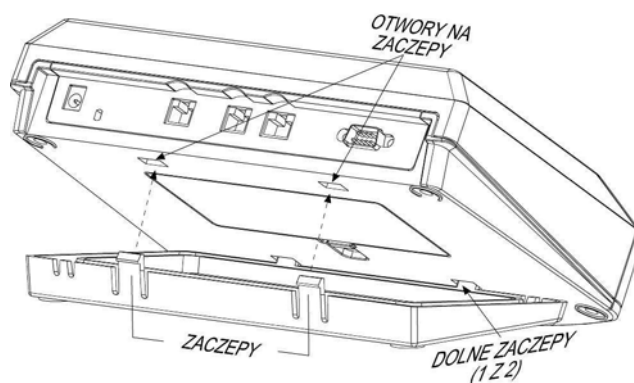


Rys. 6 – Montaż na stole

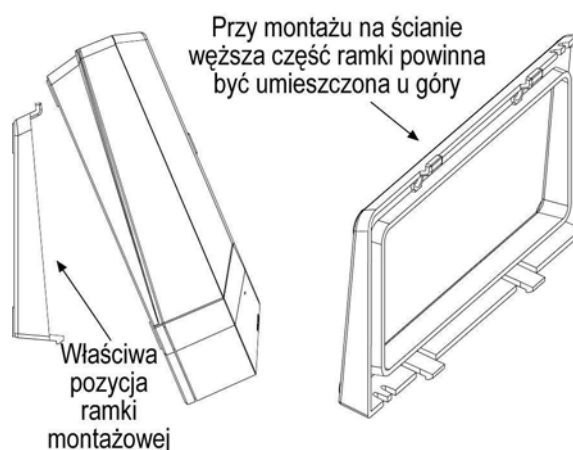


Rys. 7a

Montaż na ścianie – właściwa pozycja ramki

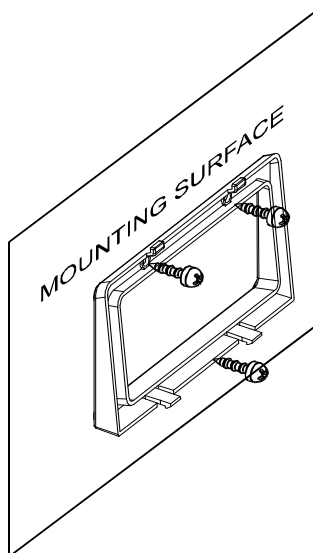

Rys. 7b

Montaż na ścianie – Montaż wkrętów na ścianie

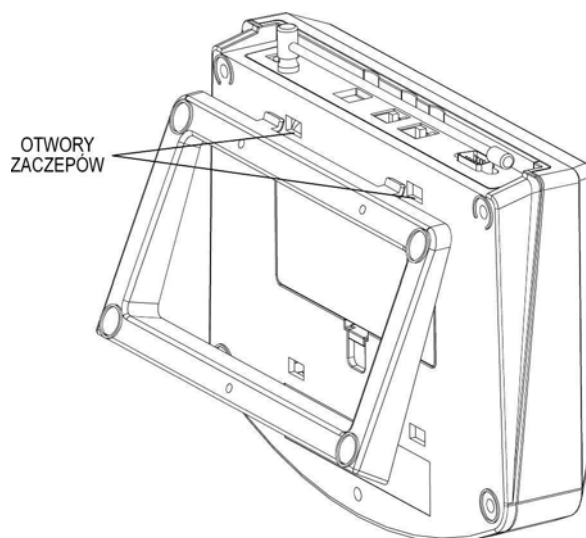

Rys. 7c

Montaż na ścianie – mocowanie ramki do urządzenia

UŻYTKOWANIE SYSTEMU

Korzystanie z aparatu

System AMBER zarządzany jest poprzez jednostkę centralną zaprojektowaną do zbierania informacji z różnych akcesoriów. Kiedy przenośny nadajnik, opcjonalny czujnik ruchu lub wskaźnik dymu zaalarmuje system, nawiązane zostanie połączenie z Call Center i powiadomione o nietypowej sytuacji.

Urządzenie posiada następujące przyciski:

- **EMERGENCY (czerwony)** – Kiedy zostanie naciśnięty, powiadomienie o nagłej/sytuacji wypadku zostanie wysłane do Call Center i zadziała dwukierunkowa komunikacja głosowa pomiędzy urządzeniem a Call Center.
- **CALL (szary)** – Kiedy zostanie naciśnięty powiadomienie o sytuacji innej niż krytyczna, zostanie wysłane do Call Center i zadziała dwukierunkowa komunikacja głosowa pomiędzy urządzeniem a Call Center.
- **CHECK (szary)** – Przycisk może być używany by:
 - odpowiadać na rozmowy przychodzące. Kiedy usłyszysz sygnał dzwonka (rozmowa przychodząca), naciśnięcie tego przycisku uruchamia system głośnomówiący.
 - potwierdzać zaprogramowane przypomnienia takie jak zażycie leków.
 - zmieniać status systemu z załączenia częściowego na całkowite. By tego dokonać przytrzymaj przycisk przez 5 sekund.
 - sprawdzić godzinę – przytrzymaj przycisk przez sekundę .
- **Szybkie wybieranie (białe)** – Aparat zawiera 3 przyciski do szybkiego połączenia telefonicznego. Dla każdego z nich operator Call Center może przyporządkować jeden numer telefoniczny. Przy ich pomocy użytkownik ma możliwość szybkiego połączenia z opiekunem lub kimś z rodziny. Bez konieczności wpisywania numeru.

Korzystanie z przenośnych nadajników

Przenośny nadajnik może być użyty, by wezwać pomoc oraz odebrać rozmowę przychodzącą. Nadajnik zapisywany jest w pamięci jednostki centralnej poprzez wpisanie specjalnego numeru identyfikacyjnego. Proces zapisu nadajnika przeprowadzany jest zdalnie z wykorzystaniem linii telefonicznej przez pracownika Call Center.

- **Aktywacja nadajnika** – przenośny nadajnik służy do wezwania pomocy w razie nagłej sytuacji np. wypadku, zagrożenia itp. . Jeśli wydarzy się taka sytuacja, naciśnij czerwony przycisk na zegarku/breloku (czerwona dioda LED będzie świeciła przez kilka sekund). System zostanie powiadomiony o nagłej sytuacji i poinformuje Call Center. Automatycznie zostanie nawiązana dwukierunkowa komunikacja głosowa. Pracownik Call Center będzie mógł udzielić wskazówek użytkownikowi bądź wezwać odpowiednie służby. Nadajnik służy również do odebrania rozmowy przychodzącej. Dokonuje się tego poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku na nadajniku. By zakończyć rozmowę ponownie naciśnij przycisk. Przenośny nadajnik jest wodoodporny i możesz go nosić nawet, gdy będziesz pod prysznicem czy będziesz zmywać .
- **Brelok** – przenośny nadajnik może być noszony na szyi. Przetnij brelok przez otwór na nadajniku, zamocuj go i urządzenie jest gotowe do użytku.
- **Opcjonalny zegarek** – przenośny nadajnik może być również w formie zegarka. Możesz regulować długość paska poprzez właściwe dopasowanie go do nadgarstka.

Wzywanie pomocy

Jeśli nagle potrzebujesz pomocy, naciśnij czerwony przycisk na przenośnym nadajniku lub duży czerwony przycisk „EMERGENCY” na jednostce centralnej.

Jeśli naciśniesz przycisk na jednostce, na wyświetlaczu pojawi się komunikat, że taka czynność została wykonana (wersja AMBER CLASSIC). System powiadamia Call Center i zgłasza się jej przedstawiciel, z którym możesz porozmawiać przez głośnik.

Awaria

Wystąpienie jakiegokolwiek problemu, sygnalizowane jest diodą LED oraz sygnałami dźwiękowymi. Call Center jest natychmiastowo powiadomione o awarii. Dopóki awaria nie zostanie usunięta na wyświetlaczu (wersja AMBER CLASSIC) będzie pokazywał się odpowiedni komunikat, a system będzie go sygnalizował co 8 godzin. Naciśnięcie przycisku „CHECK” potwierdza awarię i jednocześnie wyłącza sygnały dźwiękowe.

LED	Definicja
Zielona(zasilanie)	
Włączona	Zasilanie AC i bateria OK
Błyska	Problem z zasilaniem AC lub baterią
Żółta	
Wyłączona	Tryb załączenie całkowite
Włączona	Tryb załączenie częściowe
Błyska	Przypomnienie aktywne

Zmiana statusu systemu

Kiedy użytkownik chce wyjść z domu, może zmienić status systemu na załączenie całkowite. Aby to wykonać przycisk „CHECK” musi być przytrzymany przez 5 sekund. System przejdzie w tryb załączenia całkowitego i wyświetli się powiadomienie, że przypomnienia zostały wyłączone. W tym trybie system nie będzie wysyłał przypomnień o zażyciu leków oraz nie będzie sprawdzał nadajników. Głośnik aparatu będzie wyłączony i żółta dioda LED będzie błyskała.

Jeśli podczas trybu załączenia całkowitego zostanie wciśnięty przycisk na przenośnym nadajniku, system wyśle powiadomienie „wypadek” i zaraportuje go do Call Center. Nawiąże się dwukierunkowa komunikacja głosowa. Każde urządzenie, które wyśle alarm w trybie załączenia całkowitego również powiadomi Call Center (jak w trybie załączenia częściowego) i także zostanie nawiązana dwukierunkowa komunikacja głosowa.

By powrócić do trybu załączenia częściowego przytrzymaj przycisk „CHECK” przez 5 sekund. System ogłosi, że przypomnienia np. o zażyciu leków są włączone. Żółta dioda LED będzie wyłączona.

Ustawienie zegara / powiadomienia

Ustaw zegar (AMBER CLASSIC)

1. By wejść do ustawień zegara naciśnij przycisk „CHECK” kolejno 3 razy. Zanim ponownie naciśniesz przycisk po każdym naciśnięciu upewnij się, że słyszysz właściwą godzinę.

01/15/2004
08:25:53

2. Wykorzystaj do ustawień przyciski szybkiego wybierania 1 (przechodzi w górę) i 2 (przechodzi w dół).
3. Naciśnij przyciski szybkiego wybierania 3 by uzupełnić pozostałe dane: rok, miesiąc, dzień, minuty i sekundy.
4. Naciśnij przycisk „CHECK”, by ustawić nową datę lub czas.

(AMBER CLASSIC X)


Naciśnij przycisk „CHECK” by sprawdzić datę i status systemu.

Uwaga: Ustawienie czasu odbywa się dzięki oprogramowaniu HHCP.

Uwaga: Naciśnij przycisk Call, by powrócić do normalnego trybu. Nie spowoduje to zmian w ustawieniach zegara.

Resetowanie systemu

By zresetować system, włóż cienki przedmiot do przełącznika pokazanego na Rys 8.

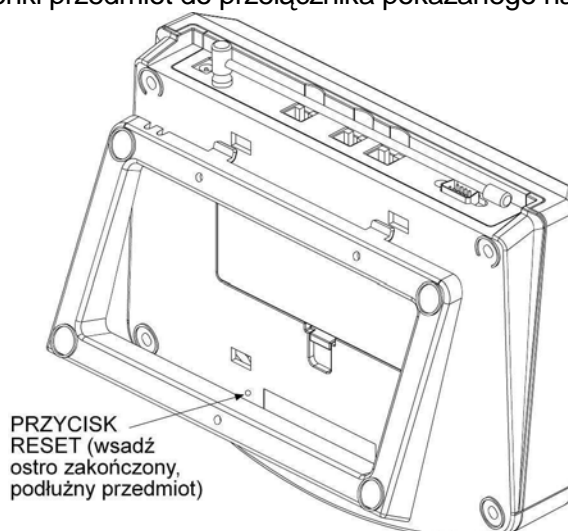

Rys. 8 – Przycisk resetu

Przyciski szybkiego wybierania

Dzięki nim:

- System wybiera 1 z 3 zaprogramowanych numerów przechowywanych w pamięci systemu.
- Można zmieniać ustawienia daty i czasu.
- Można regulować poziom głośności podczas dwukierunkowej komunikacji głosowej, w trakcie odbierania rozmów przychodzących lub rozmów wykonywanych z użyciem przycisków.

Call Center dokonuje programowania przycisków. W każdej chwili można zmienić zaprogramowany numer telefonu. W tym celu należy połączyć się z Call Center i przekazać nowy numer telefonu.

Uwaga: Zaleca się zapisanie numerów telefonów i umieszczenie ich w pobliżu aparatu.

Gdy pojawi się dym (opcjonalny wskaźnik dymu)

System może monitorować do 29 wskaźników dymu (do zakupu osobno). Jeśli wskaźnik wykryje dym, wygeneruje alarm dźwiękowy i wyśle powiadomienie do Call Center. Zgłosi się do Ciebie przedstawiciel Call Center, oceni sytuację i przedsięwzie odpowiednie kroki.

Gdy użytkownik upadnie (opcjonalny czujnik upadku)

Czujnik ruchu jest aktywowany, gdy urządzenie zostanie przechylone o 60° w jakimkolwiek kierunku.

System po 30 sekund ogłosi „Wykryto upadek”. Powiadomienie o alarmie zostanie wysłane w ciągu kolejnych 30 sekundach. Jeśli w ciągu tego czasu użytkownik powróci do właściwej pozycji system ogłosi "Upadek – Użytkownik OK".

Gdy nie wystąpiła aktywność (opcjonalny czujnik ruchu/ nadajnik)

Czujnik ruchu i kontaktron monitorują aktywność użytkownika. Jeśli taka aktywność nie wystąpi w określonym czasie, system powiadomi Call Center, które zapoczątkuje dwukierunkową komunikację głosową. Czas, podczas którego nie wystąpi aktywność jest definiowany przez Call Center. Jest to pomocna funkcja wykorzystywana przy nadzorze dzieci i osób wymagających szczególnej opieki.

Opcja „porozmawiaj” (CALL)

Dzięki specjalnej funkcji masz możliwość wykonania telefonu nie tylko po to, by wezwać pomoc. Kiedy naciśniesz przycisk „CALL”, na wyświetlaczu (wersja AMBER CLASSIC) pojawi się komunikat. Jeśli masz dostęp do takiej funkcji system połączy Cię z Call Center i rozpocznie się dwukierunkowa komunikacja głosowa.

Możesz wykorzystać przycisk „CALL”, by porozmawiać o systemie z przedstawicielem Call Center (np. zmienić jakieś ustawienie bądź dopisać nowy numer szybkiego wybierania). Może się zdarzyć, że będziesz musiał chwilę poczekać na zgłoszenie się operatora.

Tak długo jak wyświetlacz pokazuje komunikat o wybraniu rozmowy, nie ma potrzeby powtórnie naciskać przycisku.

Zdalna kontrola przez linię telefoniczną

Zarówno Call Center oraz osoba do której system wybiera numer, mogą wykonać pewne czynności wykorzystując klawiaturę telefonu:

2	Potwierdzenie raportu prywatnego
9	Sekwencja 99 kończy komunikację głosową po zgłoszeniu nietypowej sytuacji
1	Półdupleks: głośnik włączony, mikrofon wyłączony
3	Półdupleks: mikrofon włączony, głośnik wyłączony
6	Automatyczny duplex
4	Zwiększenie głośności głośnika Amber'a
7	Zmniejszenie głośności głośnika Amber'a
5	Ogłoszenie awarii
8	Awaria stop
*.#	Sekwencja **# włącza/wyłącza tryb testu użytkownika (np. test nadajnika)
0	Nie używany

TESTOWANIE

Zaleca się testowanie systemu przez wykwalifikowanego technika co najmniej raz na pół roku. Następujące czynności są niezbędne by przetestować urządzenie:

Tryb użytkownika

Są dwa sposoby wejścia w tryb użytkownika:

- Podczas każdej dwukierunkowej komunikacji głosowej, gdy jednostka centralna korzysta z linii telefonicznej, automatycznie funkcjonuje ona w trybie użytkownika
- Podczas rozmowy telefonicznej, osoba z którą rozmawiasz musi wybrać **# by wejść do trybu użytkownika. Kiedy rozmowa się zakończy linia telefoniczna powróci do normalnego stanu.

W trybie użytkownika urządzenie otrzymuje wiadomość od zapisanego czujnika wskaźnika, a zawiera ona: nazwę oraz siłę sygnału.

- **nazwa czujnika** – system pokaże rodzaj czujnika np. przenośny nadajnik, czujnik upadku, wskaźnik dymu, oraz numer przypisanej mu linii

- **siła sygnału** – 3 dźwięki wskazują na silne natężenie sygnału; 2 dźwięki dobre natężenie sygnału; 1 dźwięk – słabe natężenie; brak dźwięku świadczy o tym, że urządzeniu nie udało się rozpoznać siły transmitowanego sygnału.

Test przenośnego nadajnika

Powinieneś pamiętać o regularnym testowaniu przenośnego nadajnika. Jeśli instalator umożliwił Ci wykonywanie testów, w określonym czasie urządzenie i wyświetlacz będzie wskazywał na wykonanie testu. Na jednostce centralnej także będzie się pokazywał komunikat o naciśnięciu przenośnego nadajnika. Po wykonaniu tej czynności system ogłosi, że ukończono test.

OBSŁUGA SYSTEMU

Kiedy bateria nadajnika jest słaba

Kiedy przycisk przenośnego nadajnika jest wciśnięty a poziom baterii jest niski, urządzenie będzie błyskało kilka razy na sekundę i czerwona dioda LED na jednostce centralnej będzie się świeciła, dopóki bateria nie zostanie wymieniona. Wyświetlacz jednostki centralnej pokazuje komunikat o słabej baterii i nazwę nadajnika. System powiadomi Call Center.

Kiedy bateria czujnika dymu jest słaba

Kiedy bateria wskaźnika dymu jest słaba, będzie on wysyłał sygnały dźwiękowe, dopóki bateria nie zostanie wymieniona. Bateria wskaźnika dymu powinna działać przynajmniej rok. Aby wymienić baterie we wskaźniku odnieś się do instrukcji tego wskaźnika.

Rozwiązywanie problemów

Następująca tabela zawiera przykładową listę problemów, które mogą wystąpić oraz ich przykładowe rozwiązania.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Na aparacie świeci się czerwone światło, dźwięki są słyszalne .	Wystąpiła awaria, system powiadomi Call Center.	Naciśnij przycisk CHECK, by wyłączyć dźwięk powiadamiający o awarii (wersja AMBER CLASSIC). Pracownik Call Center pomoże Ci w usunięciu awarii.
Na wyświetlaczu (wersja AMBER CLASSIC) pojawia się komunikat o problemie z zasilaniem AC.	Brak zasilania dostarczanego do urządzenia. Aparat działa dzięki zasilaniu awaryjnym. Po 2 minutach system powiadomia CallCenter.	Sprawdź czy wystąpił problem z zasilaniem. Upewnij się, czy kabel zasilania jest właściwie podłączony do aparatu oraz sprawdź gniazdo elektryczne.
Wyświetlacz pokazuje komunikat problem z linią telefoniczną (wersja AMBER CLASSIC) .	Urządzenie nie wykrywa linii telefonicznej.	Upewnij się, że linia telefoniczna jest właściwie podłączona do urządzenia i do gniazda telefonicznego na ścianie. Jeśli problem nie minie, zgłoś go do Call Center.

Urządzenie stale emituje dźwięki.	Wystąpiła awaria urządzenia.	Naciśnij przycisk CHECK, by wyciszyć dźwięki powiadamiające o awarii. Skontaktuj się z Call Center.
Wyświetlacz (tylko AMBER CLASSIC) pokazuje komunikat niski poziom baterii w urządzeniu.	Aparat ma niski poziom baterii. System wyśle powiadomienie do Call Center.	Prawdopodobnie brak jest zasilania AC. Baterie zostaną naładowane, gdy zasilanie AC zostanie przywrócone.
Wyświetlacz pokazuje komunikat słaba bateria oraz nazwę urządzenia (tylko AMBER CLASSIC).	Bateria przenośnego nadajnika lub wskaźnika dymu jest słaba. System powiadomi Call Center.	Skontaktuj się z przedstawicielem Call Center.
Podczas korzystania z telefonu słyszysz dziwne dźwięki.	System próbuje się połączyć z Call Center.	Odkłóć słuchawkę, by system mógł zgłosić problem do Call Center. Po chwili będziesz mógł znowu korzystać z telefonu.
Słyszysz zakłócenia podczas korzystania z bezprzewodowego telefonu.	Telefon może przejmować zakłócenia z systemu.	Jeśli telefon bezprzewodowy jest podłączony do jednostki centralnej, połącz go do gniazda linii telefonicznej na ścianie z dala od jednostki centralnej.
Zegar stale miga.	Zresetowano system.	Patrz: „Ustawienie zegara”
Na wyświetlaczu (tylko AMBER CLASSIC) nie pokazuje się żaden komunikat, gdy naciskam przyciski.	System jest przeciążony.	Zresetuj system, patrz Rys.8

KOMENTARZ

Nawet najbardziej wyszukane urządzenia mogą czasami nie zadziałać ze względu na: niewłaściwe podłączenie, manipulacje systemu optycznego, zmniejszoną odporność na temperaturę otoczenia, lub awarię jednego z komponentów. Zalecane jest przeprowadzanie testów detektora i całego systemu, by zapewnić jego właściwe działanie. System ochrony nie powinien być uważany za substytut ubezpieczenia. Właściciele domów, wynajmujący powinni być wystarczająco przezorni by ubezpieczać własność, pomimo posiadania systemu alarmowego.

Urządzenie to jest godne zaufania i spełnia wymagania standardów wysokiej klasy.

Ze względu na niską moc transmisji oraz normy narzucone w tym zakresie przez odpowiednie przepisy podlega kilku ograniczeniom: odbiornik może zostać zablokowany przez silny sygnał radiowy pojawiający się w paśmie jego pracy; oraz odbiornik może zareagować na jeden sygnał w danym czasie. Jeśli wystąpią zakłócenia a użytkownik nie może ich usunąć przez wyłączenie i włączenie, zaleca się:

- przestawienie anteny odbiornika
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem
- konsultacje z dealerem lub serwisantem

1. System Amber jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami części 68 zasad FCC uznawanych przez ACTA.
2. Urządzenie połączone jest z linią telefoniczną za pomocą RJ-11 który jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami części 68 zasad FCC uznawanych przez ACTA.
3. Jeśli AMBER CLASSIC / AMBER CLASSIC X powoduje zakłócenia na linii telefonicznej, firma telefoniczna poinformuje Cię o tymczasowym zaniechaniu przesyłania usług.
4. Firma telefoniczna może wprowadzić zmiany w procedurach, udogodnieniach, operacjach, które mogłyby w jakiś sposób wpłynąć na działanie systemu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce firma ta powiadomi Cię z wyprzedzeniem by utrzymać niezakłócone świadczenie usług.

ZAŁĄCZNIK: Plan ewakuacji na wypadek pożaru


Ogień może rozprzestrzeniać się szybko po twoim domu pozostawiając Ci krótki czas na bezpieczną ucieczkę. Twoja możliwość wyjścia zależy od skutecznego ostrzeżenia (pochodzącego z detektorów dymu) i planu ewakuacji - domowy plan wyjścia zapasowego, który jest znany każdemu członkowi twojej rodziny i był przetrenowany w praktyce.

- Wspólnie z całą rodziną opracujcie plan ewakuacji.
- Narysuj plan domu wskazując dwa sposoby (drogi) wyjścia z każdego pokoju, włączając okna. Nie zapomnij zaznaczyć lokalizacji każdego detektora dymu.
- Okresowo wykonuj testowanie wszystkich detektorów (w autoryzowanym laboratorium) aby zapewnić ich skuteczność. Jeżeli trzeba wymień baterie.
- Upewnij się, że każdy rozumie plan ucieczki i rozpoznaje dźwięk alarmu pożarowego. Weryfikuj, że drogi ucieczki są niezablokowane a drzwi i okna łatwo się otwierają.

- Jeżeli okna albo drzwi w twoim domu mają kraty bezpieczeństwa upewnij się, że kraty mają wewnętrzne, szybkozwalniające mechanizmy czyli, że mogą być otwarte natychmiast w nagłym przypadku. Takie mechanizmy nie obniżają poziomu twojego zabezpieczenia ale powiększają twoje szanse bezpiecznej ucieczki z płonącego domu.
- Zastosuj w praktyce plan ucieczki przynajmniej dwa razy w roku upewniając się, że każdy jest zaangażowany - od dzieci do dziadków. Pozwól, żeby dzieci opanowały plan ewakuacji zanim przeprowadzisz ćwiczenia przeciwpożarowe, kiedy one zasną. Celem jest nabycie praktyki a nie by je przestraszyć, tak więc powiedzenie dzieciom o planowanym ćwiczeniu zanim pójdą spać może być tak samo efektywne jak niespodziewane ćwiczenie. Jeżeli dzieci albo inni nie budzą się na dźwięk alarmu pożarowego albo jeżeli w domu są niemowlęta lub członkowie rodziny z ograniczoną możliwością ruchu upewnij się, że wyznaczono kogoś do pomocy w ćwiczeniach przeciwpożarowych oraz w czasie realnego zagrożenia.
- Określ miejsce spotkania na zewnątrz, gdzie wszyscy się spotkacie po ucieczce. Pamiętaj po pierwsze należy wyjść a dopiero potem wzywać pomocy. Nigdy nie wracaj do wnętrza zanim straż pożarna ci nie pozwoli.
- Niech każdy nauczy się na pamięć numeru telefonu straży pożarnej. W ten sposób dowolny członek rodziny będzie w stanie wezwać pomoc z telefonu komórkowego albo od sąsiada.
- Bądź w pełni przygotowany na rzeczywisty ogień: kiedy zabrmi alarm pożarowy wychodź natychmiast a kiedy będziesz na zewnątrz pozostaw walnę z ogniem profesjonalistom!
- Jeżeli mieszkasz w bloku mieszkalnym upewnij się, że jesteś zaznajomiony z planem ewakuacji budynku. W przypadku pożaru używaj schodów - nigdy windy.
- Powiedz gościom albo odwiedzającym twój dom o twojej rodzinnym planie wyjścia awaryjnego. Kiedy odwiedzasz dom innych ludzi poproś ich o przedstawienie ich planu. Jeżeli oni nie mają takiego planu ofiaruj swą pomoc w jego wykonaniu. Jest to szczególnie ważne kiedy pozwalamy dzieciom spać w domach przyjaciół.

OŚWIADCZENIE

Ze względu na zasięg bezprzewodowych systemów firma Visonic i jej partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności jeśli system nie odbiera lub nie przetwarza transmitowanych sygnałów. Fale radiowe mogą być zakłócone przez niektóre czynniki. By zapewnić lepszy odbiór należy przestrzegać procedur związanych ze sprawdzaniem zasięgu. Urządzenie spełnia wymagania części 15 Norm FCC.

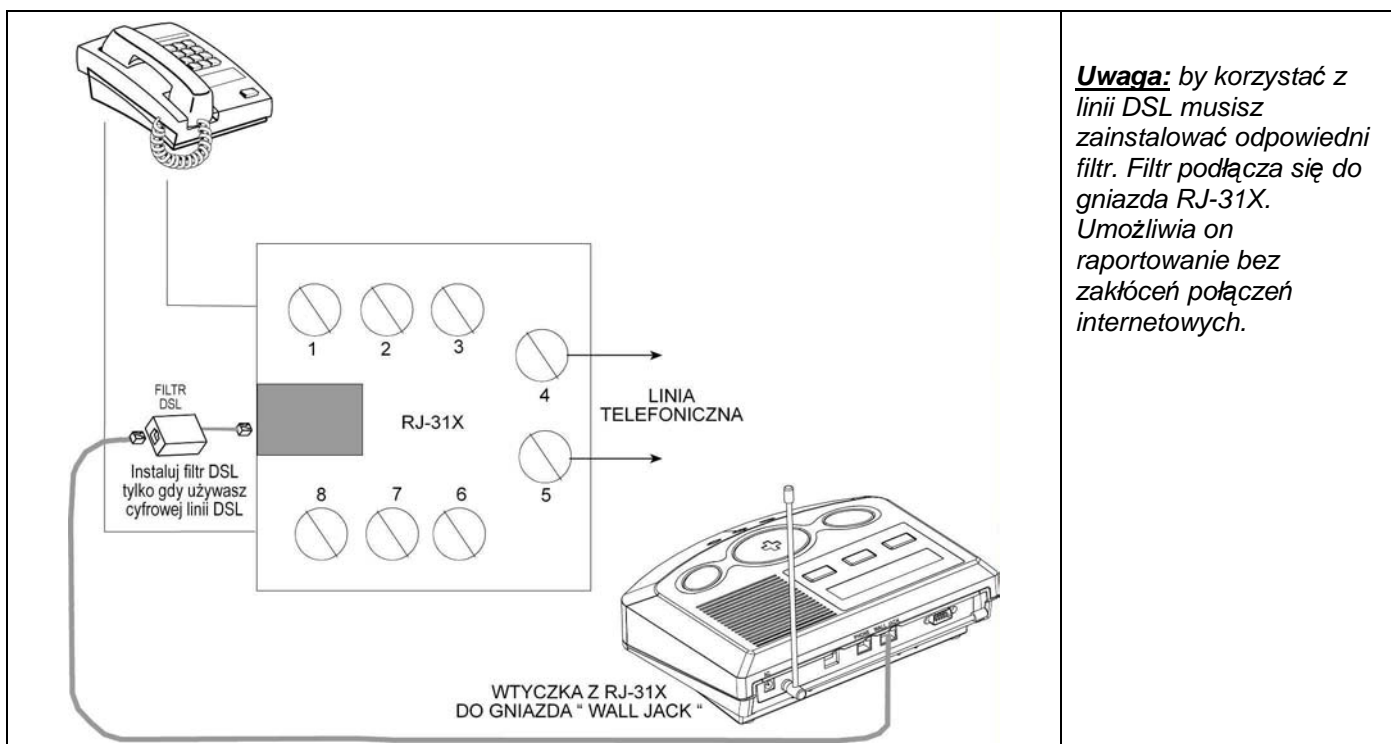

Uwaga: by korzystać z linii DSL musisz zainstalować odpowiedni filtr. Filtr podłącza się do gniazda RJ-31X. Umożliwia on raportowanie bez zakłóceń połączeń internetowych.

GWARANCJA

Visonic Ltd. i/lub jej spółki zależne i stowarzyszone ("Producent") gwarantuje, że jego produkty, o których w dalszej części mowa jest jako o "Produkcie" lub "Produktach" są zgodne z jego własnymi rysunkami technicznymi i warunkami technicznymi i są wolne od wszelkich defektów co do materiałów lub wykonawstwa w przypadku ich normalnego użytkowania i obsługi w okresie 12 miesięcy od daty wysyłki przez Producenta. Obowiązki Producenta w okresie gwarancji będą się ograniczały do, według jego uznania, naprawy lub wymiany produktu lub jakiegokolwiek jego części. Producent nie będzie ponosił opłat związanych z demontażem lub reinstalacją. Aby móc skorzystać z gwarancji produkt musi zostać zwrócony Producentowi z zapłaconym z góry frachtem i ubezpieczeniem.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach: niewłaściwa instalacja, niewłaściwe użytkowanie, nie przestrzeganie instrukcji w zakresie instalacji i działania, zmiany, nadużycie, wypadek lub ingerencja oraz naprawa przez jakąkolwiek stronę inną niż Producent.

Niniejsza gwarancja stanowi wyłączną gwarancję w miejsce wszystkich pozostałych gwarancji, zobowiązań lub odpowiedzialności, niezależnie czy podanych na piśmie czy ustnie, wyraźnych czy dorozumianych, łącznie z wszelkimi gwarancjami kupnośności lub przydatności dla szczególnego celu lub w inny sposób. W żadnym przypadku Producent nie będzie odpowiadał przed jakąkolwiek stroną za jakiegokolwiek szkody wynikowe lub uboczne z powodu naruszenia niniejszej gwarancji lub jakichkolwiek innych gwarancji, jak podano powyżej.

Niniejsza gwarancja nie zostanie zmieniona, zmodyfikowana lub rozszerzona, a Producent nie upoważnia żadnej osoby do działania w jego imieniu w zakresie modyfikacji, zmiany lub rozszerzenia niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja będzie miała zastosowanie jedynie do Produktu. Wszelkie produkty, akcesoria lub elementy składowe innych produktów zastosowane w połączeniu z Produktem, łącznie z bateriami, będą objęte wyłącznie ich własną gwarancją, jeżeli taka będzie istniała. Producent nie będzie odpowiadał za jakiegokolwiek szkody lub straty, pośrednie czy bezpośrednie, uboczne, wynikowe lub inne, spowodowane nieodpowiednim funkcjonowaniem Produktu z powodu produktów, akcesoriów, elementów składowych innych produktów, łącznie z bateriami, zastosowanymi łącznie z Produktami.

Producent nie wydaje oświadczenia, że jego Produkt nie będzie mógł zostać zaatakowany i/lub nie da się go obejść, ani że Produkt zapobiegnie śmierci, urazowi ciała i/lub obrażeniom ciała i/lub szkodzie majątkowej wskutek włamania, rozboju, pożaru lub innej szkody lub że Produkt we wszystkich tych przypadkach dostarczy odpowiednie ostrzeżenie lub zapewni ochronę. Użytkownik rozumie, że odpowiednio zainstalowany i utrzymany alarm może jedynie zmniejszyć ryzyko takich wypadków jak włamanie, rozbój i pożar, bez dostarczenia ostrzeżenia, ale że nie stanowi on ubezpieczenia lub gwarancji, że takowe nie wystąpią, ani że w ich wyniku nie wystąpi przypadek śmierci, urazu ciała i/lub szkody majątkowej.

Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadek śmierci, urazu ciała i/lub szkody majątkowej lub jakiegokolwiek innej szkody, pośredniej, bezpośredniej, wynikowej, ubocznej lub innej, w oparciu o roszczenie, że zawiodło funkcjonowanie Produktu. Jednakże, jeżeli Producent będzie odpowiadać, pośrednio lub bezpośrednio z tytułu jakiegokolwiek szkody lub straty wynikającej z tej ograniczonej gwarancji lub w inny sposób, niezależnie od przyczyny lub pochodzenia, maksymalna odpowiedzialność Producenta w żadnym przypadku nie przekroczy ceny zakupu Produktu, która zostanie ustalona jako kara umowna, a nie jako kara, i będzie pełnym i jedynym zadośćuczynieniem ze strony Producenta.

Ostrzeżenie: Użytkownik powinien stosować się do instrukcji w zakresie operacji i działania i między innymi powinien on testować Produkt i cały system co najmniej raz na tydzień. Z różnych powodów, łącznie z, ale bez ograniczania się do, zmian w warunkach środowiska naturalnego, zakłóceń elektrycznych lub elektronicznych i ingerencji, Produkt może nie funkcjonować zgodnie z oczekiwaniami. Użytkownikowi radzimy przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki ostrożności dla jego bezpieczeństwa i ochrony jego własności.



Visonic®

By żyło się bezpiecznie!

VISONIC Sp. z o.o. ul. Smoleńskiego 2, 01-698 Warszawa, tel.: (22) 639 34 36, fax: (22) 833 48 60

Sprawdź inne urządzenia chroniące Twoje zdrowie i mieszkanie: wskaźnik dymu, wskaźnik czadu, wskaźnik gazu oraz bezprzewodowy stacjonarny przycisk wezwania pomocy.

Odwiedź naszą stronę: www.visonic.com.pl

